



# Proctoscópio HB-SleeveLUX

## Instruções de Uso

Haemoband Surgical Ltd

[www.haemobandsurgical.com](http://www.haemobandsurgical.com)



### A QUEM SE DESTINA e INDICAÇÕES DE USO

O Proctoscópio HB-SleeveLUX é um instrumento descartável auto iluminado de Classe I para auxiliar os médicos no tratamento e/ou diagnóstico das condições do canal anal e na parte inferior do reto, como hemorroidas de 1º, 2º e 3º grau.

O Proctoscópio HB-SleeveLUX é um dispositivo higienizado e não estéril em uma embalagem lacrada e deve ser usado apenas uma vez. Após a utilização, o dispositivo deve ser descartado de forma adequada, de acordo com os regulamentos locais.

### Preparação para uso

1. Selecione o diâmetro apropriado do Proctoscópio HB-SleeveLUX para realizar adequadamente o tratamento ou diagnóstico.
2. Remova o Proctoscópio HB-SleeveLUX da embalagem e verifique se há danos visuais antes de usar.
3. Conecte o tubo do corpo principal à alça.
4. Certifique-se de que a luva está sobre o Trocarte e aplique um lubrificante adequado no Trocarte.

### Procedimento

1. Introduza lenta e gradualmente o Trocarte lubrificado e a luva no ânus.
2. Remova o Trocarte deixando a luva no ânus.
3. Insira o corpo principal alinhando o sistema de travamento no corpo principal e na luva. Em seguida, ligue o módulo LED.
4. O Proctoscópio HB-SleeveLUX pode então mover-se livremente dentro da luva, sem desconforto para o paciente, sem a necessidade de múltiplas introduções.
5. Após a realização do procedimento, remova todo o dispositivo do ânus.
6. Depois de removido do ânus, desconecte o módulo LED suavemente da alça e descarte-o corretamente.

### AVISO E CUIDADOS

AVISO: Os dispositivos em trânsito ou armazenados podem estar sujeitos a danos fora do controle do fabricante ou fornecedor.

AVISO: Inspeção cada dispositivo antes de usar.

AVISO: Trate os proctoscópios HB-SleeveLUX usados como material infeccioso com risco biológico. Descarte em um local adequado de acordo com as regulamentações locais.

CUIDADO: Para ser usado apenas por pessoal treinado.

CUIDADO: Não use este dispositivo para qualquer finalidade diferente daquela a que se destina.

CUIDADO: Se a embalagem for recebida danificada ou aberta, não a utilize. Inspeccione visualmente o dispositivo. Se for detectado algum defeito anormal que impeça a condição adequada de funcionamento, não o use. Contate o fornecedor ou a Haemoband Surgical Ltd. para devolução.

CUIDADO: O Proctoscópio HB-SleeveLUX é um dispositivo de uso único e deve ser descartado após o uso para evitar o risco de infecção.

CUIDADO: Proteja da luz UV.

CUIDADO: Use com cautela ao tratar pacientes em uso de coagulantes.

ARMAZENAGEM: Conservar nas embalagens originais em condições higiénicas e à temperatura ambiente recomendada entre 5°C e 30°C.

- |   |  |   |                                  |   |                 |
|---|--|---|----------------------------------|---|-----------------|
|  | Alerts the user to the possibility of a problem with the device associated with its use or misuse. Such problems include device malfunction, device failure, damage to the device or damage to other property. |  | Catalogue number                 |  | Batch code      |
|  | "WARNING" Alerts the user to the possibility of injury, death, or other serious adverse reactions associated with the use or misuse of the device  |  | Temperature limitation           |  | Use by the date |
|  | Caution, consult accompanying documents  |  | Keep away from rain              |  | Latex-Free      |
|  | Date of manufacture (yyyy-mm)  |  | Do not use if package is damaged |  | Non-sterile     |
|  | Recyclable Packaging Materials   |  | Protect from sunlight            |  | Do not reuse    |



Haemoband Surgical Ltd.  
 The Mount Business Centre  
 2 Woodstock Link  
 Belfast, BT6 8DD  
 Northern Ireland (UK)  
 Tel: +44 (0)28 90 737 283

