



Proctoscopio HB-SleeveLUX

Instrucciones de uso

Por Haemoband Surgical Ltd



www.haemobandsurgical.com

USO PREVISTO e INDICACIONES DE USO

El proctoscopio HB-SleeveLUX es un instrumento desechable autoiluminado de clase I que se utiliza para ayudar a los médicos en el tratamiento y/o diagnóstico de afecciones del canal anal y la parte inferior del recto, como las hemorroides de primer, segundo y tercer grado.

El proctoscopio HB-SleeveLUX es un dispositivo limpio y no estéril en un envase sellado y está destinado a un solo uso. Tras su uso, el dispositivo debe desecharse de forma adecuada según la normativa local.

Preparación para el uso

1. Seleccione el diámetro apropiado del proctoscopio HB-SleeveLUX para realizar adecuadamente el tratamiento o diagnóstico.
2. Retire el proctoscopio HB-SleeveLUX del embalaje e inspecciónelo para detectar cualquier daño visual antes de utilizarlo.
3. Conecte el tubo del cuerpo principal al mango, utilizando las ranuras de alineación (negativo/positivo) de ambas partes.
4. Asegúrese de que el manguito esté sobre el trocar y aplíquelo un lubricante adecuado.

Procedimiento

1. Introduzca lenta y gradualmente el trocar lubricado y el manguito en el ano.
2. Retire el trocar dejando el manguito en el ano.
3. Inserte el cuerpo principal alineando el sistema de bloqueo en el cuerpo principal y el manguito. A continuación, encienda el módulo LED.
4. Entonces, el proctoscopio HB-SleeveLUX puede moverse libremente dentro del manguito sin causar molestias al paciente y sin la necesidad de múltiples introducciones.
5. Una vez realizado el procedimiento, retire todo el dispositivo del ano.
6. Una vez retirado del ano, desenganche fácilmente el módulo LED del mango y deséchelo correctamente.
7. El resto del dispositivo debe desecharse de la forma adecuada

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

ADVERTENCIA: Los dispositivos en tránsito o almacenados pueden sufrir daños ajenos al control del fabricante o proveedor.

ADVERTENCIA: Inspeccione cada dispositivo antes de utilizarlo.

ADVERTENCIA: Trate los proctoscopios HB-SleeveLUX usados como material infeccioso de riesgo biológico. Deséchelos en una unidad de eliminación adecuada y/o según la normativa local.

PRECAUCIÓN: Para uso exclusivo por parte de personal capacitado.

PRECAUCIÓN: No utilice este dispositivo para ningún otro fin distinto del previsto.













PRECAUCIÓN: Si el embalaje se recibe abierto o dañado, no lo utilice. Inspeccione visualmente el dispositivo. Si detecta algún defecto anómalo que impida su correcto funcionamiento, no lo utilice. Póngase en contacto con el proveedor o con Haemoband Surgical Ltd para su devolución.

PRECAUCIÓN: El proctoscopio HB-SleeveLUX es un dispositivo de un solo uso y debe desecharse después de su uso para evitar el riesgo de infección.

PRECAUCIÓN: Proteja de la luz UV

PRECAUCIÓN: Utilice con precaución cuando se trate a pacientes con anticoagulantes.

CONSERVACIÓN: Conserve en las cajas originales en condiciones de limpieza y a temperatura ambiente: se recomienda entre 5 °C y 30 °C.

	Alerta al usuario de la posibilidad de un problema con el dispositivo asociado a su uso o mal uso. Dichos problemas incluyen el mal funcionamiento del aparato, su avería, daños al aparato o daños a otros bienes.	REF	Número de catálogo	LOT	Código de lote
	"ADVERTENCIA" Alerta al usuario de la posibilidad de lesiones, muerte u otras reacciones adversas graves asociadas al uso o mal uso del dispositivo.		Limitación de temperatura		Fecha de caducidad
	Precaución, consulte los documentos de acompañamiento.		Mantener alejado de la lluvia	LATEX	No contiene látex
	Fecha de fabricación (aaaa/mm)		No utilizar si el envase está dañado		No estéril
	Materiales de embalaje reciclables		Proteger de la luz solar		No reutilizar



Haemoband Surgical Ltd.
 The Mount Business Centre
 2 Woodstock Link
 Belfast, BT6 8DD
 Irlanda del Norte (Reino Unido)
 Tel.: +44 (0)28 90 737 283



