

Hämorrhoiden- Multiband-Ligator

Haemoband-PLUS

Automatische Neuladetechnik
Für den Einmalgebrauch

Produkt-Nr. H1002

Von:
 **Haemoband**
SURGICAL

Das innovative Design umfasst:

GRÜNE GEFORMTE BÄNDER – Diese Bänder wurden aus unserem einzigartigen Verbundmaterial entwickelt, das speziell für eine gleichbleibende Leistung und eine längere Haltbarkeit entwickelt wurde. Die einzeln geformten Bänder rollen sich leichter ab, verhindern ein Verdrehen und sorgen für eine zuverlässigere Freigabe und einen sicheren Sitz auf dem Gewebe.

TRANSPARENTE SAUGDÜSE – Die Klarheit der durchsichtigen Spitze maximiert die Sichtbarkeit während des gesamten Verfahrens. Sie befindet sich an der Spitze einer schlanken, 120 mm langen Einführsonde.

VORGELADEN MIT 4 BÄNDERN – Das Gerät wird sauber und sofort einsatzbereit geliefert, ohne dass neue Bänder eingelegt werden müssen. Das Gerät lädt automatisch 3 weitere Bänder für die Ligatur von bis zu drei Hämorrhoiden nach, wobei das vierte Band als Reserve dient.

MULTIFUNKTIONSGRIFF – Der innovative Griff steuert die Ansaugung, schießt das Band ab und lädt weitere Bänder nach. Eine neue, abgestufte Linie führt den Benutzer durch jede Phase der Anwendung.





Goldstandard- Behandlung

Für die Behandlung von Hämorrhoiden steht eine breite Palette von Möglichkeiten zur Verfügung, die je nach Schweregrad der Erkrankung von einfachen Ernährungsempfehlungen bis hin zu aggressiven chirurgischen Eingriffen reichen.

Minimalinvasive, ambulante Verfahren werden von den Patienten jedoch offensichtlich bevorzugt.

Die Gummibandligatur mit dem Haemoband-PLUS-Gerät wird von Patienten und Ärzten gleichermaßen als effiziente und sichere Behandlung von symptomatischen Hämorrhoiden des 1. bis 3. Grades erachtet.

Das Verfahren kann ambulant durchgeführt werden und hat sich als unkompliziert, einfach und kostengünstig erwiesen.



Wichtige Vorteile:

Klinisch effizient

Haemoband-PLUS ist klinisch sehr effizient. Dank des Multifunktionsgriffs benötigen Sie nur eine Hand, um die Ansaugung zu steuern, die Bänder freizugeben und neu zu laden, sodass die andere Hand frei bleibt, um das Proktoskop zu halten, und der Anwender allein arbeiten kann. Das Design von Haemoband-PLUS ermöglicht auch wesentlich präzisere Anwendungen, wodurch der Bedarf an zusätzlichen Verfahren verringert wird.

Einfacher und schneller

Die Pistole ist vorgeladen, bereits sauber und kann einhändig bedient werden. Der Zeitaufwand für ein typisches Ligationsverfahren reduziert sich von 20 Minuten auf 2 bis 4 Minuten für das Abbinden von bis zu drei Hämorrhoiden. Dadurch wird nicht nur der Patientenkomfort erheblich erhöht, sondern, da es sich um ein Einweggerät handelt, auch das Risiko einer Kreuzkontamination ausgeschlossen.

Direkt einsatzbereit

Die Haemoband-PLUS-Pistole ist direkt aus dem luftdicht verschlossenen, sauberen Beutel einsatzbereit. Es gibt keine Zusatzteile und die einzigen zusätzlichen Geräte, die Sie benötigen, sind ein Proktoskop und eine krankenhausübliche Absaugvorrichtung.

Kosteneffizient

Das Haemoband-PLUS ist einer der kostengünstigsten Multiligatoren auf dem Markt. Es handelt sich um ein Einweggerät, was die zusätzlichen Kosten eliminiert, die mit der Nutzung von mehrfach verwendbaren Geräten verbunden sind.

Anwendung:



Schritt 1:

Bringen Sie die Saugvorrichtung mit dem Universalapplikator an der Unterseite des Griffs an.



Schritt 2:

Drücken Sie den Auslöser bis zur ersten markierten Linie, um einen Sog zu erzeugen – dadurch wird das gewünschte Gewebe in die Düse gezogen.



Schritt 3:

Wenn das Gewebe gesichert ist, drücken Sie den Auslöser in die endgültige Position – dadurch wird das Band auf die betreffende Hämorrhoid freigesetzt.



Schritt 4:

Loslassen! Wenn der Auslöser vollständig losgelassen wird, wird automatisch ein neues Band geladen und ist für die nächste Anwendung bereit.



Haemoband Surgical Ltd.
The Mount Conference Centre
2 Woodstock Link
Belfast
BT6 8DD
Nordirland, Vereinigtes Königreich.

Tel.: +44 (0)28 90737283
E-Mail: info@haemobandsurgical.com