


Ligateur multibande hémorroïdaire

Haemoband-PLUS

Technologie à recharge automatique
À usage unique

Produit n° H1002

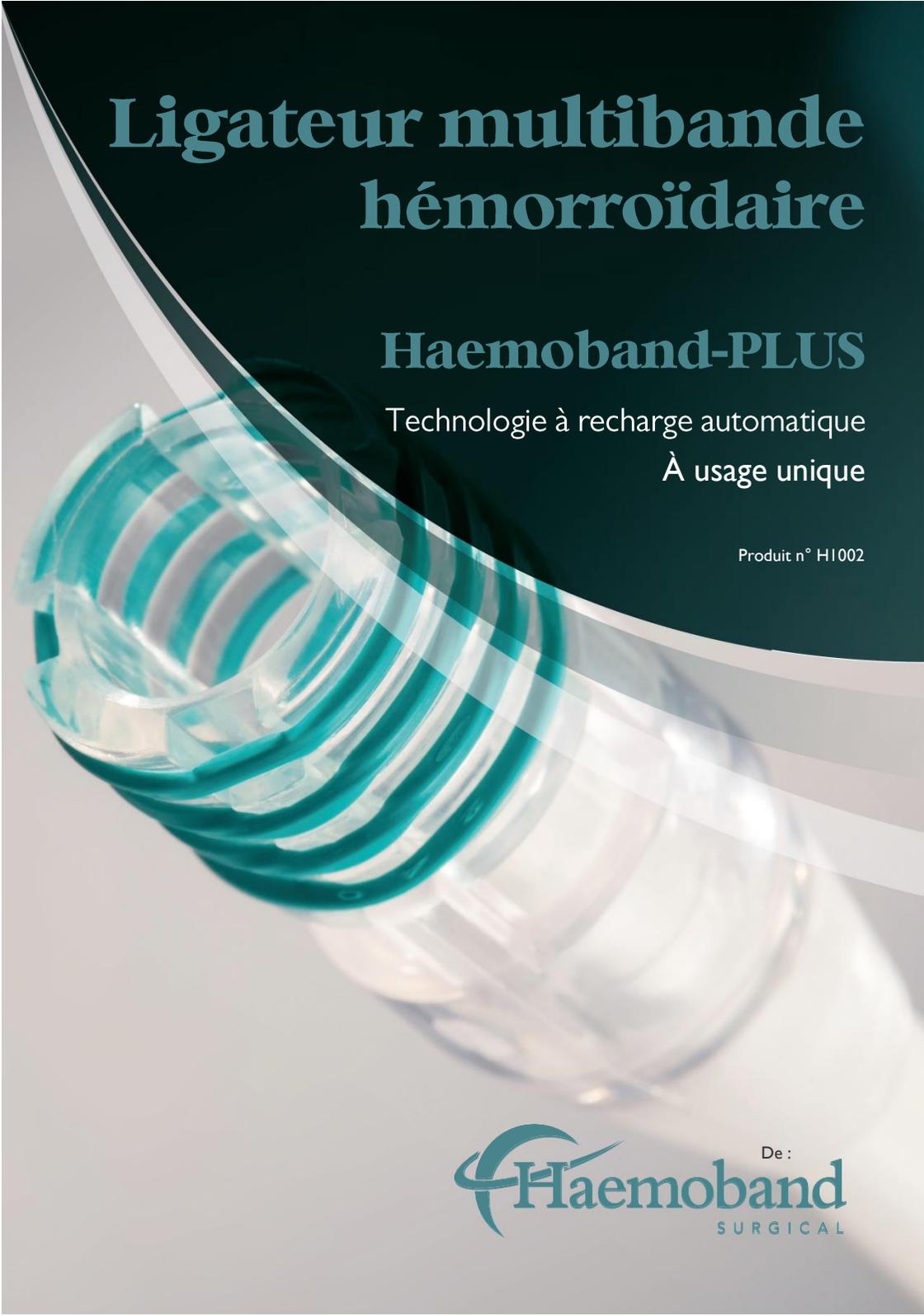

De :
Haemoband
SURGICAL

Un design innovant avec :

BANDES MOULÉES VERTES : ces bandes ont été développées en utilisant notre matière composite unique, spécialement conçue pour garantir un rendement optimal ainsi qu'une durée de conservation prolongée. Ces bandes moulées individuellement s'enlèvent plus facilement, éliminant les torsions et garantissant un relâchement plus efficace et un bon maintien sur le tissu.

BUSE D'ASPIRATION TRANSPARENTE : grâce à la clarté de l'embout transparent, la visibilité est optimale tout au long de la procédure. Cet embout est placé à l'extrémité d'une sonde d'insertion mince de 120 mm.

4 BANDES PRÉ-CHARGÉES : le dispositif est propre et prêt à l'emploi dès sa sortie de l'emballage, sans avoir à charger de nouvelles bandes. 3 bandes supplémentaires sont automatiquement rechargées pour ligaturer jusqu'à trois hémorroïdes, la quatrième bande étant utilisée comme bande de réserve.

POIGNÉE MULTI-ACTIONS : la poignée innovante permet de commander l'aspiration, l'envoi des bandes et le rechargement. Une nouvelle ligne graduée guide l'utilisateur à chaque étape de l'application.



Traitement de référence

Le traitement des hémorroïdes dispose d'un large éventail de solutions, qui varient selon la gravité de l'affection, allant de simples conseils diététiques à une intervention chirurgicale agressive. Les patients préfèrent évidemment les procédures ambulatoires peu invasives.

L'utilisation du dispositif Haemoband-PLUS de ligature à bande est très bien accueillie par les patients et les praticiens, puisqu'il s'agit d'un traitement efficace et sûr des hémorroïdes symptomatiques de grade I à 3.

Cette procédure peut être réalisée en ambulatoire et s'est avérée simple, claire et économique.



Avantages principaux :

Efficacité clinique

L'efficacité clinique d'Haemoband-PLUS est très élevée. Grâce à sa poignée multi-action, une seule main suffit pour commander l'aspiration, la libération et le rechargement des bandes, ce qui laisse l'autre main libre pour tenir un proctoscope et permet ainsi à l'utilisateur de travailler en autonomie. Le design d'Haemoband-PLUS permet également des applications beaucoup plus précises, diminuant ainsi le besoin de procédures supplémentaires.

Plus facile et plus rapide

Le pistolet est préalablement chargé, déjà propre et peut être utilisé d'une seule main. Le temps nécessaire à une procédure de ligature type est réduit de 20 minutes à environ 2 à 4 minutes pour cercler jusqu'à 3 hémorroïdes. En plus de l'amélioration considérable du confort du patient, le fait que le pistolet soit jetable élimine le risque de contamination croisée.

Prêt à l'emploi

Le pistolet Haemoband-PLUS est prêt à l'emploi dès sa sortie du sachet hermétique et propre. Aucune pièce supplémentaire n'est nécessaire, et vous n'avez besoin que d'un proctoscope et d'un système d'aspiration hospitalier standard.

Rentable

L'Haemoband-PLUS est l'un des multiligateurs les plus rentables actuellement disponibles. Il s'agit d'un dispositif à usage unique ce qui élimine les coûts supplémentaires associés aux appareils à usage multiple.

Mode d'emploi :



Étape 1 :

Fixez le système d'aspiration à l'aide de l'applicateur universel situé sur la partie inférieure de la poignée.



Étape 2 :

Appuyez sur la gâchette jusqu'à la première ligne indiquée pour déclencher l'aspiration. Cela attirera le tissu visé dans l'embout.



Étape 3 :

Une fois le tissu fixé, appuyez sur la gâchette jusqu'à ce qu'elle atteigne sa position finale. Cela permet de relâcher la bande sur l'hémorroïde ciblée.



Étape 4 :

Relâchez ! Une fois la gâchette complètement relâchée, une nouvelle bande sera automatiquement rechargée et prête pour la prochaine application.



Haemoband Surgical Ltd.
The Mount Conference Centre
2 Woodstock Link
Belfast
BT6 8DD
Irlande du Nord, Royaume-Uni.

Tél. : +44 (0)28 90737283
E-mail : info@haemobandsurgical.com