


Proctoscópio HB-SleeveLUX

Uso único,
autoiluminado

From:
Haemoband
SURGICAL

○ **Proctoscópio HB-SleeveLUX** autoiluminado é de uso único, totalmente descartável, para uso no diagnóstico do canal anal e reto inferior:

Seu design exclusivo recebeu a patente **Comfort Sleeve & Locking Technology (Luva de Conforto e Tecnologia de Fechamento)** o que permite maior conforto ao paciente e uma aplicação conveniente em um ambiente mais simples.

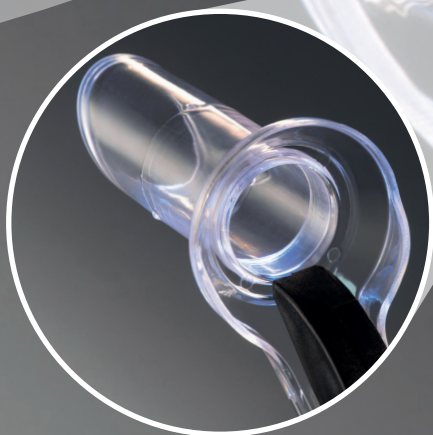



Pronto para usar

Com uma luz LED de alta intensidade totalmente integrada, alimentada por bateria, o proctoscópio HB-SleeveLUX está pronto para uso assim que sai da embalagem. Ao final do procedimento, o módulo LED é facilmente destacado do corpo principal do dispositivo, permitindo um descarte fácil e seguro de acordo com a maioria das regulamentações locais.

Foco no Paciente

A exclusiva Luva de Conforto (Comfort Sleeve) do Proctoscópio HB-SleeveLUX é introduzida com o Trocar. O tubo do Proctoscópio é então inserido através da Luva de Conforto (Comfort Sleeve) usando a alça e com o benefício do módulo de luz integrado que fornece iluminação total. Graças à Luva de Conforto (Comfort Sleeve), o Proctoscópio pode ser introduzido, girado livremente ou totalmente retirado sem causar desconforto ao paciente. A tecnologia patenteada – o funcionamento único da Luva de Conforto (Comfort Sleeve) e Proctoscópio – permite a remoção parcial ou completa do Proctoscópio, sem qualquer desconforto ao paciente.

Rápido e eficiente

A inovadora Luva de Conforto (Comfort Sleeve) proporciona ao médico a flexibilidade de posicionar o Proctoscópio em qualquer ângulo. Isto torna o procedimento mais confortável para o paciente e mais fácil para o médico.

Projetado para ajudar o médico

- O tubo do proctoscópio HB-SleeveLUX é intencionalmente maior em diâmetro para facilitar procedimentos como a bandagem de hemorroidas ou a realização de uma biópsia.
- O tubo de maior diâmetro não tem impacto negativo no paciente devido à tecnologia da Luva de Conforto (Comfort Sleeve).

Como é o mecanismo de funcionamento e trava da Luva de Conforto (Comfort Sleeve)?

Ao desenvolver o Proctoscópio HB-SleeveLUX, nosso principal objetivo foi melhorar o conforto do paciente e, ao mesmo tempo, criar um instrumento de nova geração que fosse mais fácil de usar pelos médicos.

A Luva de Conforto (Comfort Sleeve) e a tecnologia de travamento (Locking Technology) do proctoscópio HB-SleeveLUX resolvem esse problema.

A Luva de Conforto (Comfort Sleeve) - inserida usando o Trocar - protege eficazmente o tecido sensível abaixo da linha dentada. O Proctoscópio HB-SleeveLUX pode então ser inserido várias vezes e girado 360° sem qualquer desconforto para o paciente. A Luva de Conforto (Comfort Sleeve) também funciona como barreira e ponto de partida por onde devem ser realizadas bandagens para hemorroidas ou quaisquer outros procedimentos.

Nossa tecnologia de travamento (Locking Technology) inovadora e patenteada, previne a remoção acidental do Proctoscópio durante o uso, eliminando assim desconforto desnecessário do paciente. O mecanismo de travamento é acionado alinhando corretamente o tubo do corpo principal do Proctoscópio com a Luva de Conforto (Comfort Sleeve) inserida. Uma vez que o Proctoscópio é colocado no alinhamento correto, ele fica livre para se mover radialmente, mas é impedido de ser removido por três batentes elevados integrados.

Especificações:

	Código	Comprimento	Diâmetro	LED Integrado
HB-SLEEVELUX 24	P2001	81 mm	24 mm	Sim
HB-SLEEVELUX 16	P2002	66 mm	16 mm	Sim



Haemoband Surgical Ltd.
The Mount Conference Centre
2 Woodstock Link
Belfast
BT6 8DD

Tel: 028 90737283
Email: info@haemobandsurgical.com