



Haemoband Plus Multi-band Ligator (H1002)

Bruksanvisning

Genom Haemoband Surgical Ltd  0050
www.haemobandsurgical.com

AVSEDD ANVÄNDNING och INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

Haemoband Plus Multi-band ligator är ett klass IIa latexfritt engångsinstrument som används för bandligering av inre hemorroider av 1: a 2: a och 3: e graden hos vuxna (18+ år). Haemoband Plus är en ren och icke-steril enhet som är utformad för att förkorta behandlingstiden för bandligering och förenkla proceduren genom att kräva färre personer.

Förberedelse för användning

1. Ta ut Haemoband Plus Band-ligator ur den lufttåta, icke-sterila förpackningen.
2. Anslut en flexibel slang från en godkänd medicinsk sugpump eller ett internt sugsystem med hjälp av universalkopplingen som sitter längst ned på multiligatorhandtaget. Negativt tryck för optimal användning är 600 mmHg.

Procedur

1. För in Haemoband Plus genom ett protoskop/anoskop.
2. Placera multiligatorns spets på hemorroiden och tryck försiktigt in avtryckaren till den markerade linjen. Detta ger den mängd sugning som krävs för att säkra en tillräcklig mängd vävnad.
3. Fortsätt att trycka avtryckaren till sitt slutläge för att applicera bandet och släpp sedan avtryckaren för att minska sugningen och frigöra hemorroiden.
4. När avtryckaren släpps laddas Haemoband Plus automatiskt om med nästa band och är redo för omedelbar användning på en annan hemorroid på samma patient.
5. Efter användning ska enheten kasseras på lämpligt sätt.

VARNING & FÖRSIKTIGHET

VARNING: Under transport eller förvaring kan enheten utsättas för skador som ligger utanför tillverkarens eller leverantörens kontroll.

VARNING: Kontrollera varje enhet före användning.

VARNING: Efter användning ska Haemoband Plus hanteras som biofarligt, smittsamt material. Kassera i en lämplig behållare och/eller i enlighet med lokala bestämmelser.

FÖRSIKTIGHET: Får endast användas av utbildad personal.

FÖRSIKTIGHET: Använd inte denna enhet för något annat ändamål än det avsedda.

FÖRSIKTIGHET: Använd inte öppnad eller skadad förpackning. Inspektera enheten visuellt och använd den inte om du upptäcker onormala defekter som förhindrar korrekt användning. Kontakta leverantören eller Haemoband Surgical Ltd för återlämning.

FÖRSIKTIGHET: Haemoband Plus är en enhet för engångsbruk och måste kasseras efter användning för att förhindra risk för infektion.

FÖRSIKTIGHET: Skyddas mot UV-ljus.

FÖRSIKTIGHET: Används med försiktighet vid behandling av patienter som får antikoagulantia.

KONTRAINDIKATIONER

Banden är latexfria, men används inte för att behandla 4: e gradens, kontinuerligt prolapsande hemorroider eller analpolyper. (Vid närvaro av perineal infektion kan de användas efter att infektionen har lagt sig.)

FÖRSIKTIGHET

Användning av läkemedel: Läkemedel som acetylsalicylsyra och andra trombocythämmande medel ska sättas ut 5–7 dagar före ingreppet och återinsättas 5–7 dagar efter ingreppet. Detta beror på att sådana läkemedel påverkar trombocytfunktionen, vilket kan öka risken för perioperativ blödning/blödning.

Grad av hemorrojd: Bandning ska inte användas när det inte finns tillräckligt med vävnad för fäste i munstycket på enheten, t.ex. hemorrojder av grad 4. Vid hemorrojder av grad 4 är kirurgiskt ingrepp en lämpligare behandling, t.ex. standardhemorroidektomi eller häftad hemorroidektomi.

OÖNSKADE EFFEKTER

Proceduren vid bandligering kan orsaka vanliga biverkningar som lätt blödning och milt obehag. Detta är normalt när bandet lossnar från kroppen. Andra effekter, även om de är sällsynta, kan upplevas efter ingreppet, såsom: perioperativ blödning/blödning, svår smärta på grund av band placerade ovanför dentatlinjen och nära analkanalen, infektion i analområdet/sepsis, återkommande hemorrojd/er, vasovagal reaktion och bandglidning.

UPPFÖLJANDE BEHANDLINGAR

Ytterligare behandlingar kan övervägas med 4–6 veckors intervall vid behov, t.ex. läkarordinerade smärtstillande läkemedel/antibiotika. Framgångssiffrorna för bandning är höga, men i vissa fall krävs ytterligare en bandningsprocedur om ingen förändring av tillståndet har rapporterats.

FÖRVARING

Multiligatorerna tillhandahålls i kartonger om 10 st. De förvaras i kartongerna under lagring i rena förhållanden och vid rumstemperatur - rekommenderat mellan 5°C och 30°C. Multiligatorer bör användas inom 18 månader efter tillverkningen.

Sista förbrukningsdag är tydligt tryckt på omslaget till varje förpackning.

NOTERA

Om en allvarlig incident inträffar i samband med enheten ska det rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten där användaren och/eller patienten är hemmahörande.



Gör användaren uppmärksam på att det kan finnas ett problem med enheten i samband med användning eller felanvändning. Sådana problem kan vara funktionsfel i enheten, enhetsfel, skada på enheten eller skada på annan egendom.



"WARNING" Gör användaren uppmärksam på risk för personskada, dödsfall eller andra allvarliga biverkningar i samband med användning eller felaktig användning av enheten.



Var försiktig, se medföljande dokument



Tillverkningsdatum (åååå-mm)



Återvinningsbart förpackningsmaterial



Katalognummer



Temperaturgräns



Håll borta från regn



Får inte användas om förpackningen är skadad



Skyddas från solljus



Satsnummer



Används före



Latexfri



Icke-steril



Får ej återanvändas

Haemoband Surgical Ltd.
The Mount Business Centre
2 Woodstock Link
Belfast, BT6 8DD
Nordirland (UK) Tel: +44
(0)28 90 737 283

